



1./obrázok

3M United Kingdom PLC, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, UK
 3M Wrocław Sp. z o.o., Kowalska 143, 51-424 wrocław, Poland

CE 2797		EN 149:2001+A1:2009	TP TC 019/2011
Aura™ 9310+, 9312+	FFP1 NR D	FFP1 NR D	
Aura™ 06910+	FFP1 NR D		
Aura™ 9320+, 9322+	FFP2 NR D	FFP2 NR D	
Aura™ 06923+	FFP2 NR D		
Aura™ 9330+, 9332+	FFP3 NR D	FFP3 NR D	
Aura™ 06933+	FFP3 NR D		

3M Slovensko s.r.o.
 Polus Tower II, Vajnorská 100/B,
 831 04 Bratislava, Slovensko
 Tel: +421 249 105 211

3M Česko, s.r.o.
 V Parku 2343/24
 148 00 Praha 4
 Tel: +420 261 380 111

△ Produkt nepoužívajte, ak máte bradu alebo fúzy, ktoré by mohli brániť kontaktu tváre s okrajmi produktu, a tým spôsobiť nedostatočné utesnenie.

- Kontaminovaný oblasť ihneď opustite, ak:
 - a) sa sťaží dýchanie.
 - b) sa vyskytne pocit nevoľnosti, závrat alebo bolesť.
- Respirátor ihneď nahradte, ak je poškodený, ak sa zvýšil odpor pri dýchaní, alebo po skončení pracovnej zmeny.
- Respirátor nikdy neupravujte, neperáčajte, ani neopravujte.
- Likvidujte v súlade s miestnymi nariadeniami.
- V prípade plánovaného použitia vo výbušnom prostredí, kontaktujte 3M.
- Pred prvým použitím sa vždy uistite (podľa dátumu), či nebol prekročený dátum spotreby.

POKYNY NA NASADENIE

Pozri obrázok 1.

Pred nasadením výrobu sa uistite, či máte čisté ruky.

Pred každým použitím respirátora sa presvedčte, že žiadna z jeho súčastí nie je poškodená.

1. Respirátor obráťte tak, aby boli upínacie remienky hore a s použitím uška na spodnom dieli oddelte vrchný a spodný diel respirátora tak, aby ste vytvorili tvar podobný šálke.

V strede nosovú sponu jemne ohnite.

2. Uistite sa, či sú jednotlivé diely respirátora úplne rozprestreté.

3. Vezmite respirátor do jednej ruky tak, aby otvorená strana respirátora smerovala k vašej tvári. Vezmite oba upínacie remienky do druhej ruky.

Nasaďte respirátor pod bradu s nosovou sponou otočenou hore a pretiahnite oba remienky cez hlavu.

4. Umiestnite horný upínací remienok na temeno hlavy a spodný remienok pod uši. Remienky nesmú byť prekrížené. Pre pohodlné nosenie prispôbte hornú a spodnú časť respirátora. Uistite sa, že časti respirátora vrátane uška nie sú pokrčené.

5. Pomocou oboch rúk vytvarujte nosovú sponu podľa tvaru vášho nosa, čím dosiahnete správne nasadenie a tesnosť. Formovanie nosovej spony s pomocou len jednej ruky môže znížiť účinnosť respirátora.

6. Utesnenie respirátora na tvári by malo byť overené pred vstupom do kontaminovaného prostredia.

SKÚŠKA TESNOTY

1. Zakryte prednú časť respirátora dlaniami, pričom dávajte pozor,

aby ste nezmenili polohu respirátora.

Za) Respiratory bez výdychového ventilu – prudko VYDÝCHNITE;

Zb) Respiratory s výdychovým ventilom – prudko sa NADÝCHNITE.

3. Ak vzduch uniká okolo nosa, upravte znovu nosovú sponu, aby ste zabránili ďalšiemu úniku vzduchu. Následne opätovne preverte utesnenie respirátora podľa postupu, ktorý je uvedený vyššie.

4. Ak vzduch uniká po okrajoch respirátora, priťahnite remienky po stranách hlavy. Znovu preverte utesnenie respirátora.

Ak sa vám NEDARÍ dosiahnuť riadne utesnenie, NEVSTUPUJTE do kontaminovaného prostredia.

Pre ďalší postup sa obráťte na svojho nadriadeného.

Skúška tesnoty by mala byť v súlade s miestnymi požiadavkami.

Pre bližšie informácie ako vykonať skúšku tesnoty, prosím, kontaktujte miestne zastupiteľstvo spoločnosti 3M.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Výrobok skladujte v súlade s inštrukciami výrobu, ktoré sú uvedené na balení. POZNÁMKA Priemerne skladovacie podmienky 25°C / 80% relatívnej vlhkosti môžu byť na určitý čas prekročené. Skladovacie podmienky môžu dosiahnuť hodnoty 38°C / 85% relatívnej vlhkosti maximálne počas 3 mesiacov.

Pri skladovaní a preprave respirátora používajte pôvodné balenie.

Neskladujte na priamom slnku.

ZNAČENIA NA VÝROBKU

NR = Jednorazové použitie (len počas jednej pracovnej zmeny) D = Splňa požiadavky prvého uplatňujúceho Koniec doby použiteľnosti. Dátum vo formáte: RRRR/MM/DD | = Teplotné roztoky | = Maximálna relatívna vlhkosť.

Likvidujte v súlade s miestnymi nariadeniami.

Obaly nie sú vhodné pre styk s potravinami.

SCHVÁLENIA

Tieto produkty sú typovo schválené a ročne audítované jednou zo spoločností: BSI Group, The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Holandsko, číslo 2797 a / alebo BSI Assurance UK Ltd, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, UK, číslo 0086. Tieto produkty splňujú požiadavky európskej regulácie (EU) 2016/425 a miestnu legislatívu. Príslušné európske / miestne právne predpisy a notifikované teleso môžu byť určené na základe preskúmania osvedčenia a vyhlásení o zhode na www.3m.com/Respiratory/certs.

Tieto produkty spĺňajú požiadavky normy EN149:2001+A1:2009, filtračné polomasky k ochrane voči časticiam. Tieto produkty chránia používateľa len voči pevným a neprchavým kvapalným časticiam.

△ Zvýšenú pozornosť venujte upozorneniam, pri ktorých je výstražný symbol

△ UPOZORNENIA A OBMEDZENIA

Pred použitím sa vždy uistite, či je výrobok:

- vhodný pre zamýšľané použitie;
- správne nasadený;
- používaný počas celej doby, kedy ste vystavený nebezpečnému prostrediu;
- nahradený novým, ak je to potrebné.

● Správny výber, školenie, použitie a náležitá údržba sú nevyhnutné pre adekvátnu ochranu používateľa voči škodlivým látkam nachádzajúcich sa v ovzduší. Nerešpektovanie pokynov o správnom používaní prístrojov na ochranu dýchania, respektíve ich nesprávna aplikácia v čase, keď je používateľ vystavený zdraviu škodlivému prostrediu, môže mať nepriaznivý dopad na jeho zdravie, zapríčiniť život ohrozujúce ochorenie, alebo viesť k trvalej invalidite.

- V záujme vhodného a správneho použitia, dodržiavajte miestne nariadenia a využite všetky dostupné informácie. Pre viac informácií kontaktujte bezpečnostného technika alebo zástupcu 3M (pozri kontaktné údaje).
- Pred použitím musí byť používateľ správne vyškolený o používaní tohto výrobku v súlade so zdravotnými a bezpečnostnými normami/postupmi.
- Výrobok neobsahuje žiadnu časť vyrobenú z prírodného kaučuku.
- Výrobok nechráni používateľa voči plynovým výparom.
- Nepoužívajte v atmosfére, ktorá obsahuje menej ako 19,5% kyslíka. (Definícia 3M. Jednotlivé krajiny môžu aplikovať vlastné limity na množstvo kyslíka. Ak máte pochybnosti, poraďte sa s bezpečnostným technikom).
- Výrobok nepoužívajte v prostredí, v ktorom nie je známa znečisťujúca látka/úroveň jej koncentrácie a ani v prostredí, v ktorom je bezprostredne ohrozené zdravie či život užívateľa (IDLH).